

# Kurzanleitung Antigen-Selbsttest

Produkt: COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)  
Hersteller: Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.



## Vorbereitung

1

Verschlussfolie vom Röhrchen entfernen und Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)




## Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2

Abstrichtupfer nacheinander in beide Nasenlöcher etwa 2,5 cm einführen, jeweils fünfmal gegen die Naseninnenseite drehen

Den Tupfer nicht tiefer einführen, wenn Widerstand spürbar ist

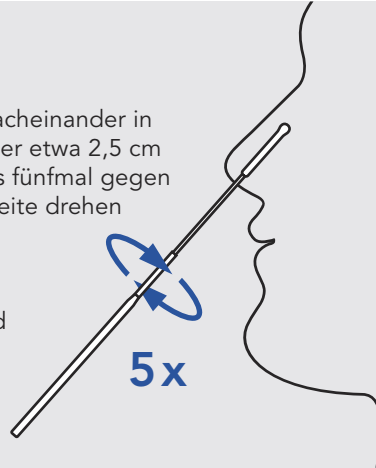


## Probenbehandlung

3

mind. 8-10x

Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen, mindestens acht- bis zehnmal drehen und dabei gegen die Röhrchenwand drücken

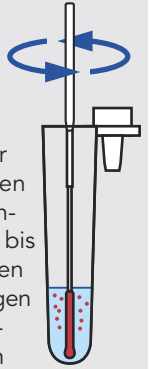

## Probenbehandlung

4


Abstrichtupfer entnehmen und dabei Röhrchen mittig zusammenpressen, um Flüssigkeit vom Tupfer abzustreifen

Anschließend Tropfkappe fest aufsetzen



5

Drei Tropfen in die Probenvertiefung auf der Testkassette geben

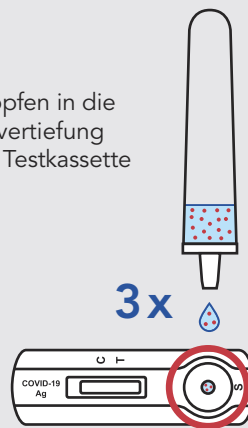

6

Ergebnis ablesen


nach 10-15 min



Sind mehr als 20 Minuten vergangen, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden

## Auswertung Testergebnis

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

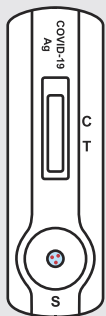


Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



keine Infektion nachweisbar

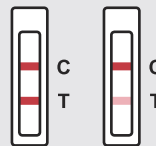


Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Verdacht auf Infektion

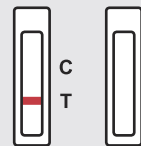

Ungültig / unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Test wiederholen

## Entsorgung



Verwendete Testkits in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll entsorgen